

FERTIGUNGSANWEISUNG

FÜR DIE EINARBEITUNG VON ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN IN SICHERHEITSSCHUHEN GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte und legt die zu verwendenden Materialkomponenten fest, die als orthopädische Einlagen für ELTEN-Sicherheitsschuhe verwendet werden dürfen. Die Anweisung ist notwendig, um die Konformität mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung auch noch nach Einarbeitung der orthopädischen Einlage zu gewährleisten. Bei Abweichung der Fertigung von dieser Anweisung erlischt die Gültigkeit der EG-Baumuster-Prüfbescheinigung und es besteht Haftungsrisiko!

ARBEITSSCHRITTE UND MATERIALKOMPONENTEN

- Diese Fertigungsanweisung gilt für den Einsatz des Rohlings **ESD PRO** der ELTEN GmbH.
Eigenschaften der ESD PRO: ESD fähig, mit Deckmaterial und als ganzflächige Einlage einsetzbar.
- Basisprodukt ist der serienmäßig gefertigte Schuh aus dem zertifizierten ELTEN Sortiment. Diese orthopädische Einlage kann für die Artikel der Produktgruppen ELTEN Biomex Dynamics, ELTEN Safeguard, ELTEN L10, ELTEN Miss L10, ELTEN Dimension Pro, ELTEN Ergo-Active, ELTEN Biomex Protection, ELTEN Trainers, ELTEN Classic-Line, ELTEN Men at work, ELTEN Safety-Grip, ELTEN Specials, ELTEN White und O by ELTEN verwendet werden. (siehe Seite 2–5)
- Der Einlagenrohling kann individuell umgearbeitet werden.
- Folgende Umbauten sind möglich: bis zu 10mm Verkürzungsausgleich, mit oder ohne Versteifung, Innenranderhöhung, Außenranderhöhung, Tieflegung und Polsterung, sowie Fersenerhöhung bis max. 10mm.
- Die Materialstärke dieser Einlegesohle darf im Stahlkappenbereich nicht verändert werden.
- Alle zur Veränderung der Einlage benötigten Materialien sind frei wählbar, wenn diese unterhalb des Seriendeckmaterials und außerhalb des Stahlkappenbereichs verwendet werden.
- In vielen der zertifizierten Modelle liegt der Einlagenrohling ab Werk drin. Dies können Sie auf den Seiten 2-5 nachlesen. Die Farbe des Bezugs darf schwarz oder grau sein.
- Wenn der Einlagenrohling nicht beiliegt, können Sie diesen beim ELTEN Team bestellen. Bei Bestellung der einzelnen Sohle ist nur die schwarze Variante erhältlich. Art.-Nr. 204054 Größe 35–52
- Alternativ aus als Plattenware erhältlich. Art.-Nr. 204100 Größen: 36–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45–46, 47–52
- Für die Produktgruppe Miss L10 bitte die Damen-Variante bestellen. Art.-Nr. 204056 Größe: 35–42

KENNZEICHNUNG

- Die orthopädische Veränderung ist im Schuh unterhalb der orthopädischen Einlage entsprechend durch das verändernde Organ zu kennzeichnen:
 - a) mit Name des Herstellers (Name des Orthopädiebetriebes)
 - b) mit der Typnummer. (siehe nachfolgende Tabelle)

FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DEN EINSATZ DER EINLAGE ESD PRO

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	EINLEGESOHLE LIEGT BEI	TYPENNUMMER
Dimension Pro	72944	RUNABOUT Easy ESD S1		13
Dimension Pro	72955	RUNABOUT Low ESD S2		18
Dimension Pro	76955	RUNABOUT Mid ESD S2		18
Dimension Pro	71733	AMBITION blue Easy ESD S1		13
Dimension Pro	72733	AMBITION blue Low ESD S1		13
Dimension Pro	76733	AMBITION blue Mid ESD S1		13
Dimension Pro	72752	AMBITION BOA® Low ESD S2		18
Dimension Pro	76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2		18
Dimension Pro	72742	DESIRE Low ESD S1		13
Dimension Pro	76742	DESIRE Mid ESD S1		13
Dimension Pro	72753	RUSHER Low ESD S1		13
Dimension Pro	76753	RUSHER Mid ESD S1		13
Dimension Pro	727821	HORIZON Low ESD S3		75
Dimension Pro	767821	HORIZON Mid ESD S3		75
Biomex Dynamics	721551	IMPULSE green Easy ESD S1P		262
Biomex Dynamics	72145	IMPULSE grey Easy ESD S1		259
Biomex Dynamics	722551	IMPULSE green Low ESD S1P		262
Biomex Dynamics	72245	IMPULSE grey Low ESD S1		259
Biomex Dynamics	762551	IMPULSE green Mid ESD S1P		262
Biomex Dynamics	76245	IMPULSE grey Mid ESD S1		259
L10	72109	BREEZER grey Low ESD S1	x	19
L10	721041	BREEZER blue Low ESD S1P	x	11
L10	721051	BREEZER black Low ESD S1P	x	11
L10	761051	BREEZER black Mid ESD S1P	x	11
L10	72141	PHIL Easy ESD S1P	x	11
L10	72112	ONYX Low ESD S2		10
L10	72123	SKATER ESD S2	x	10
L10	72106	SENSATION Low ESD S2	x	10
L10	76106	SENSATION Mid ESD S2	x	10
L10	72110	MAROON Low ESD S2		10
L10	72322	PURE Easy ESD S1	x	37
L10	72312	PURE Slipper ESD S2	x	38
L10	761091	EMOTION ESD S3		11
L10	721061	CHECKER Low ESD S3		11

FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DEN EINSATZ DER EINLAGE ESD PRO

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	EINLEGESOHLE LIEGT BEI	TYPENNUMMER
L10	761061	CHECKER Mid ESD S3		11
L10	721081	SHADOW Low ESD S3		11
L10	761081	SHADOW Mid ESD S3		11
L10	721071	VINTAGE Low ESD S3	x	11
L10	761071	VINTAGE Mid ESD S3	x	11
L10	761021	AZUR Mid ESD S3	x	11
Miss L10	74422	PURE Lady Easy ESD S1	x	239
Miss L10	74121	BREEZER Lady black Low ESD S1P	x	214
Miss L10	74106	SENSATION Lady Low ESD S2	x	213
Miss L10	74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	x	213
Miss L10	74171	GHOST Lady Low ESD S3	x	241
Miss L10	74271	GHOST Lady Mid ESD S3	x	241
Miss L10	74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	x	214
Miss L10	74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	x	214
Miss L10	74231	CHECKER Lady Mid ESD S3		214
Miss L10	74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3		214
Miss L10	74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3		214
Ergo-Active	72374 + 01102103	ADAM ESD S1		127
Ergo-Active	7273 + 01102103	SAMMY ESD S1		127
Ergo-Active	2572 + 01102103	JAN grey S1		127
Ergo-Active	72072 + 01102103	GARY ESD S1		127
Ergo-Active	72077 + 01102103	GRANT blue Low ESD S1		127
Ergo-Active	72066 + 01102103	GRANT neon Low ESD S1		127
Ergo-Active	72252 + 01102103	GRANT red Low ESD S1		127
Ergo-Active	72154 + 01102103	MATS ESD S2		128
Ergo-Active	72471 + 01102103	ROB ESD S3		93
Ergo-Active	76471 + 01102103	RUBEN ESD S3		93
Biomex Protection	765421	RENZO Biomex GTX® ESD S3 CI	x	27
Biomex Protection	763421	RENZO Biomex ESD S3	x	14
Biomex Protection	63331	DINO black S3		48
Trainers	72130	INSPIRE ESD S1	x	49
Trainers	72178	EASY blue ESD S1	x	49
Trainers	72138	STEPHEN ESD S1	x	49

FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DEN EINSATZ DER EINLAGE ESD PRO

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	EINLEGESOHLE LIEGT BEI	TYPENNUMMER
Trainers	72825	SUNNY ESD S1	x	49
Trainers	72622	TRIBUTE black Low ESD S2	x	57
Trainers	72170	MOTION Air ESD S1	x	55
Trainers	72182	MOTION Low ESD S2	x	57
Trainers	76182	MOTION Mid ESD S2	x	57
Trainers	72131	SID ESD S3	x	32
Trainers	728781	NICK ESD S3		32
Trainers	768781	NEIL ESD S3		32
Trainers	72121	SCOTT ESD S1P	x	58
Trainers	728321	SENEX ESD S3	x	58
Trainers	768321	SANDER ESD S3	x	58
Trainers	726661	SCOTT Pro ESD S1P	x	58
Trainers	726771	SENEX Pro ESD S3	x	58
Trainers	766771	SANDER Pro ESD S3	x	58
Sportics	72826	SKY grey-yellow ESD S1		124
Sportics	72129	SCOTT ESD S1		124
Sportics	72832	SENEX ESD S2		125
Sportics	76832	SANDER ESD S2		125
Safeguard	728441	AMBITION AL Low ESD S3		284
Safeguard	768441	AMBITION AL Mid ESD S3		284
Safeguard	76521	JOSCHI ESD S3		284
Safeguard	727551	SCOTT AL ESD S1P		284
Safeguard	728551	SENEX AL ESD S3		284
Safeguard	768551	SANDER AL ESD S3		284
Safeguard	728531	SENEX Boa® ESD S3		284
Safeguard	768531	SANDER Boa® ESD S3		284
Classic Line	723291	LASLO ESD S1P	x	30
Classic Line	72623	LEN ESD S2	x	45
Classic Line	76623	LEX ESD S2	x	45
Classic Line	26231	LEN S3		48
Classic Line	66231	LEX S3		48
Men at Work	72495	PETER ESD S1	x	46
Men at Work	72058	BASTIAN Low ESD S2	x	45

FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DEN EINSATZ DER EINLAGE ESD PRO

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	EINLEGESOHLE LIEGT BEI	TYPENNUMMER
Men at Work	76058	BASTIAN Mid ESD S2	x	45
Safety-Grip	722841	THORE Easy ESD S1P	x	277
Safety-Grip	72061	TOBY Low ESD S3 HI	x	44
Safety-Grip	76061	TOBY Mid ESD S3 HI	x	44
Safety-Grip	729321	TODD Low ESD S3	x	212
Safety-Grip	769321	TODD Mid ESD S3	x	212
Safety-Grip	721191	TILL Low ESD S3 HI	x	44
Safety-Grip	761191	TILL Mid ESD S3 HI	x	44
Safety-Grip	60561	LUTZ S3 HI		91
Safety-Grip	726862	RENZO XW Low ESD S2	x	208
Safety-Grip	726882	RENZO XXW Low ESD S2	x	208
Safety-Grip	725841	RENZO Low ESD S3	x	27
Safety-Grip	725861	RENZO XW Low ESD S3	x	203
Safety-Grip	725881	RENZO XXW Low ESD S3	x	203
Safety-Grip	765841	RENZO Mid ESD S3	x	27
Safety-Grip	765861	RENZO XW Mid ESD S3	x	203
Safety-Grip	765881	RENZO XXW Mid ESD S3	x	203
Safety-Grip	65461	RENZO D30 Mid S3		91
Safety-Grip	65451	RENZO GTX® PU S3 CI		27
Safety-Grip	67471	RENZO Glass S3 CR		91
Safety-Grip	726841	LAURENZO Low ESD S3	x	14
Safety-Grip	766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	x	14
Safety-Grip	766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	x	67
Safety-Grip	65741	RENZO Winter S3 CI		14
Safety-Grip	68461	JORIS GTX® S3 CI		91
Safety-Grip	78671	RIGGER Boot ESD S3 CI		14
Safety-Grip	86771	WILL S3 CI		27
Specials	64461	CARL S3 HI		91
Specials	86541	ERIC S3 CI		76
Specials	88781	ARBORIST GTX® S3 CI		66
White	72015	WHITE Easy Low ESD S1	x	210
White	72016	WHITE Loop Low ESD S2	x	211
White	76016	WHITE Loop Mid ESD S2	x	211

FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DEN EINSATZ DER EINLAGE ESD PRO ORTHO

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	EINLEGESOHLE LIEGT BEI	TYPENNUMMER
White	72498	WHITE Slipper Low ESD S2	x	211
White	720171	WHITE Strap Low ESD S3	x	212
White	760171	WHITE Strap Mid ESD S3	x	212
O by elten	92109	BREEZER grey Low ESD 01	x	215
O by elten	92112	ONYX Low ESD 02		5
O by elten	972182	MOTION Low ESD 02	x	224
O by elten	976182	MOTION Mid ESD 02	x	224

